

Almofada JAY BALANCE

Proteção da pele, estabilidade e conforto



O equilíbrio perfeito entre a proteção da pele e a estabilidade


Descobre o equilíbrio com Jay Balance

JAY desenvolveu a nova almofada Jay Balance após anos de experiência no mercado oferecendo a mais alta proteção da pele com a máxima estabilidade e conforto.

PROTEÇÃO DA PELE E CONFORTO. A forma com contornos da base e a sua composição de espuma suave permitem a imersão das tuberosidades isquiáticas e os trocanteres protegendo assim a pele do usuário e maximizando o seu conforto durante a sedestação. A forma exclusiva da parte traseira da ondulada evita migrações do fluido e graças ao sistema de 2 fundas, Jay Balance proporciona ao mesmo tempo respiração da pele e proteção anti-humidade da almofada.

ESTABILIDADE Y POSICIONAMENTO graças à forma e tamanho da ondulada pélvica e às cunhas de posicionamento que se pode adicionar facilmente à funda interior da almofada para adaptar-se às necessidades de posicionamento específicas de cada usuário.



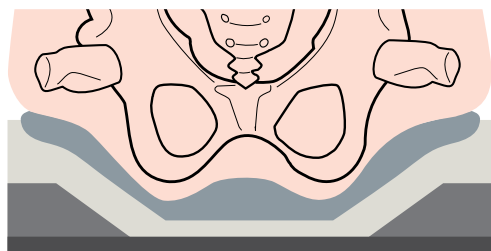

Base de espuma com contornos, multi-capa

A almofada Jay Balance tem uma base com contornos, formada a partir de espuma de células fechadas. O seu desenho especial na zona do fémur e na parte traseira ajuda a prevenir a migração do fluído, ao mesmo tempo que proporciona um suave suporte aos trocanteres e também na parte posterior da pélvis.

A largura da ondulada pélvica é o resultado de um estudo em que foi observado as dimensões médias da pélvis para cada um dos tamanhos da almofada. Isto faz com que, a ondulada do Jay Balance tenha as dimensões adequadas para oferecer à grande maioria dos usuários estabilidade anterior e lateral, um correto posicionamento e com ele assegurar os objectivos clínicos de imersão das zonas de risco e distribuição do peso para uma protecção máxima da pele.



Preenchimento da ondulada pélvica - Tecnologia de Fluido JAY™ ou ar ROHO™

A ondulada pélvica é a peça chave da almofada. É a parte que envolve as proeminências ósseas da pélvis maximizando a distribuição de pressões mantendo a boa integridade da pele.

A almofada Jay Balance oferece 2 opções para o preenchimento da ondulada: bolsa de fluido JAY ou bolsa de ar ROHO. Ambas se ajustam perfeitamente à forma de cada indivíduo, a sua posição sentado, e assegura a colocação adequada do fluido/ar por debaixo das proeminências ósseas para uma ótima proteção da pele.



O desenho especial da bolsa de fluido JAY garantem ótimos resultados durante todo o ciclo de vida da almofada.



O nível de ar da bolsa ROHO pode ser ajustada para acomodar posturas assimétricas ou alterações do paciente.



Kit de posicionamento (opcional)

As cunhas e suportes que contém o kit permitem um correto posicionamento da pélvis e das pernas, oferecendo soluções a múltiplas necessidades clínicas. Favorecem o alinhamento corporal, aumentam a tolerância à sedestação e permitem a adaptação a futuras alterações nas necessidades do usuário.



Tecnologia de funda dupla

- Para garantir a comodidade e proteção do usuário, Jay Balance incorpora de série 2 fundas: uma interior e outra exterior. Combinando as vantagens de cada uma delas é possível conseguir o equilíbrio perfeito entre a ótima ventilação da pele e uma efetiva proteção da almofada frente à incontinência do usuário.
- A funda interior é impermeável e muito fácil de retirar e limpar. Com tecnologia Aquaguard e cosida em especial no fecho para garantir que a base de espuma se mantenha sempre seca.
- A funda exterior Micro climática favorece a ventilação e dissipa o calor e a humidade para uma maior proteção da pele. Jay Balance permite, além disso, selecionar outros 2 tipos de funda exterior: Funda de Incontinência ou Funda Elástica.
- Todas as fundas exteriores se caracterizam pela sua flexibilidade excepcional. É muito importante uma vez que permite incorporar na almofada as cunhas de posicionamento sem gerar tensões e ajuda a reduzir o risco de desenvolver úlceras por pressão. Também podem ser lavadas na máquina até 60° C e são de secagem rápida.





JAY BALANCE

Largura da almofada	34 cm a 60 cm
Profundidade da almofada	34 cm a 60 cm
Altura da almofada	8,5 cm
Peso máximo do usuário	150 kg (largura de 34 cm a 50 cm); 225 kg (largura de 56 cm a 60 cm)
Peso da almofada	2,3 kg (almofada de 40 x 40 cm com fluído); 1,6 kg (almofada de 40 x 40 cm com ar)
Preenchimento da ondulada	Fluído ou Ar (de 1 ou 2 válvulas)
Funda exterior	De Incontinência, Micro climática ou Elástica
Kit de posicionamento	Opcional



Os nossos produtos estão em constante processo de melhorias, pelo que a Sunrise Medical reserva-se no direito de alterar o desenho dos mesmos e as especificações indicadas sem aviso prévio.

Sunrise Medical S.L

Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga
Vizcaya, España
Tel: +34 (0) 902 14 24 34
Fax: +34 (0) 94 648 15 75
www.SunriseMedical.es